

Cell Wipe™ & Cell Shield™

Bedienungsanleitung

Schritt 1

Reißen Sie die Cell Wipe Verpackung auf, holen Sie das Tuch heraus und falten Sie es auseinander.

Schritt 2

Wischen Sie sanft über die Oberfläche Ihres Mobiltelefons oder Mobilgeräts.



Schritt 2 - 3

Schritt 3


Warten Sie bis das Tuch leicht getrocknet ist; polieren Sie für streifenfreie Klarheit. Im Mülleimer entsorgen.

Schritt 4

Waschen oder desinfizieren Sie Ihre Hände.

Schritt 5

Ziehen Sie das Cell Shield aus der Spenderbox.

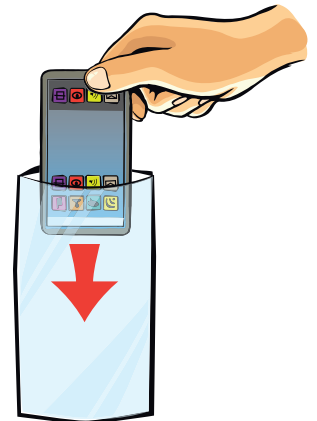


Schritt 6

Schritt 6

Setzen Sie Ihr Gerät, mit der Kamera zuerst, in das Cell Shield ein.

Schritt 7

Ziehen Sie die Klebefolie ab, falten Sie die selbstdichtende Klappe über die Rückseite des Geräts und dichten Sie sie ab.

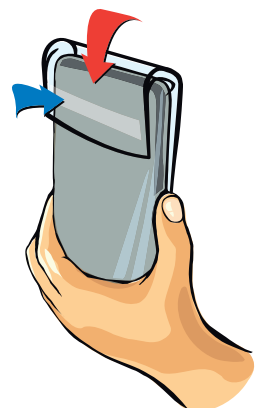

Schritt 7

Schritt 8

Ersetzen Sie das Cell Shield alle 12 Stunden oder eher, wenn Verschmutzungen oder Risse zu sehen sind. Nach Gebrauch entsorgen.