


# Livia 3,5 Fr Blasenkatheter

für die Anwendung bei Früh- und  
Neugeborenen und Kindern

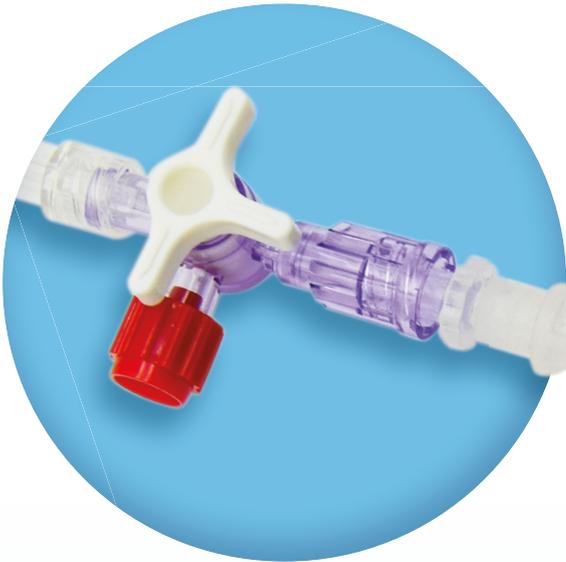


Der 3,5 Fr Livia Blasenkatheter (Ø 1,2 mm) wurde speziell für die Anwendung bei Frühgeborenen entwickelt. Mit dem Blasenkatheter-Set wird die Urinausscheidung des Frühgeborenen präzise gemessen und eine kontinuierliche Überwachung sichergestellt.

Der 3,5 Fr Livia Blasenkatheter wird verwendet, um Urinkulturen und genaue Urinausscheidungen bei Neugeborenen und Kindern zu erhalten. Diese bevorzugte Harnableitungsmethode eliminiert die Unannehmlichkeiten und Messfehler, die mit dem Wiegen von Windeln verbunden sind. Der Blasenkatheter ist ein geschlossenes Harnableitungssystem mit Silikonelastomer-Harnröhrenkatheter, der zur präzisen Urinausscheidung bei Neugeborenen und Kindern verwendet wird.

## Merkmale:

Der Silikonkatheter hat eine weiche, abgerundete Spitze und eine nicht benetzbare Oberfläche, um Traumata beim Einführen zu reduzieren.

Das biokompatible, nicht reaktive Silikon minimiert Harnröhrenreizungen und Krustenbildung.

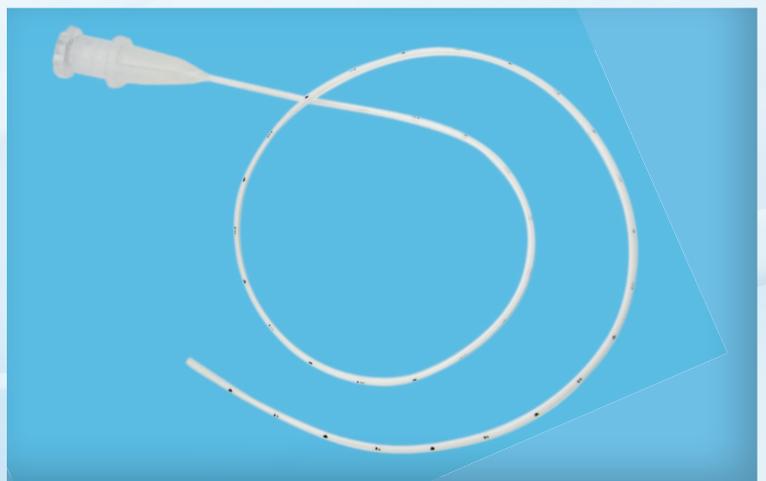


Art.Nr.	Katheter Ø	Beschreibung	Stk./Pkg.
LK35Fr250	3,5 Fr 1,2 mm	Einwegprodukt, steril	10

# Livia 3,5 Fr Blasenkatheter-Set



Das Livia Blasenkatheterset ist ein geschlossenes Harndrainagesystem, mit dem bei Neugeborenen und Kindern genaue Urinausscheidungen gemessen werden können. Das Livia Blasenkatheter-Set besteht aus einem vormontierten 3,5 Fr Silikon-Blasenkatheter, einem Dreiwegehahn für Probenahmezwecke und einer 100-ml-Bürette zur genauen Messung der Urinausscheidung.

Das vorab montierte, sterile und geschlossene System minimiert das Risiko von Infektionen. Der Dreiwegehahn mit Injektionsstelle ermöglicht sowohl eine kontaminationsfreie Probenahme im mittleren Strahl wie auch das Spülen des Katheters. Durch die Verwendung der 100-ml-Sammelbürette kann die Urinausscheidung präzise gemessen werden. Der Silikon-Blasenkatheter ist mit einer weichen, abgerundeten Spitze und einer nicht benetzbaren Oberfläche ausgestattet, um Traumata beim Einführen zu reduzieren. Das biokompatible und nicht reaktive Silikon minimiert Harnröhrenreizungen und Krustenbildung. Der Katheter ist auch separat erhältlich.

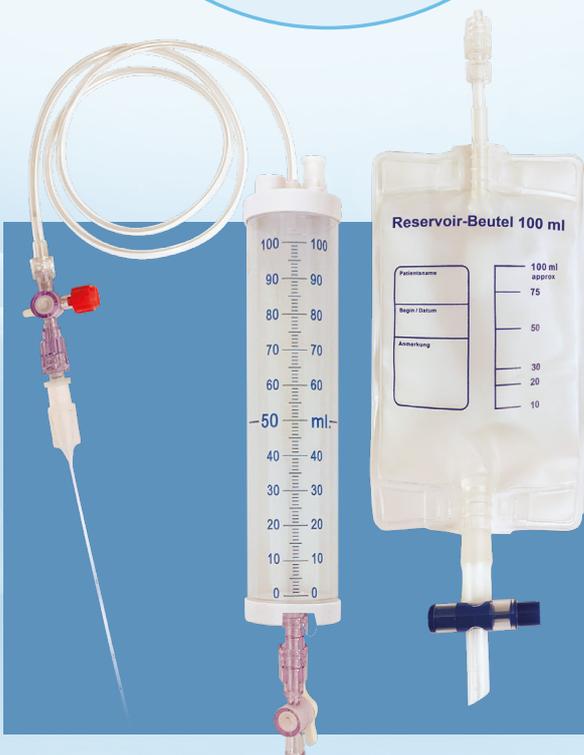

## Das Set besteht aus:

- Biokompatibler 3,5 Fr Blasenkatheter
- Dreiwegehahn mit latexfreier Injektionsstelle
- 100-ml-Sammelbürette mit Ablasshahn
- 100-ml-Harnauffangbeutel

Art.Nr.	Katheter Ø	Beschreibung	Stk./Pkg.
LK35Fr250-Set	3,5 Fr 1,2 mm	Einwegprodukt, steril	10